

瀚醫生技防粘連可吸收膠

HANBIO BarriGel

衛部醫器製字第 005261 號

注意：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

產品資訊

骨盆腔內組織粘黏通常是因為骨盆腔的手術所引起的，並且可能造成骨盆腔疼痛或不孕。

這種手術後組織粘黏的情況，是因為在相鄰的器官間出現纖維化的組織。為了防止手術後的組織粘黏，需要使用一種產品以阻隔相鄰組織的接觸，並且能夠持續附著在組織上達足夠的時間。

本品為滅菌、透明且黏稠的玻尿酸凝膠，主要成分是玻尿酸的衍生物，而玻尿酸是人體的結締組織、上皮細胞及間皮組織的重要組成成份。

不用添加外來的連結分子交聯就可以增加黏稠度，因此多醣結構增加了黏稠性及使用時可以延長附著在組織的時間，同時如同天然玻尿酸分子一樣，保有良好的生物相容性及容忍性。

本品可以完整地附著在組織表面，形成一層抗組織粘黏的屏障，可減少手術後組織的粘連。

適應症

用於避免或減少婦產科骨盆腔部位手術後組織粘黏的發生

使用說明

1. 先將本產品取出，讓其溫度與室溫平衡。
2. 打開包裝袋，將注射筒移至無菌區，並使用標準無菌操作手續。
3. 打開注射筒尖端的保護蓋。
4. 推動注射筒，將凝膠塗佈在骨盆腔所需使用之位置。
5. 將凝膠完全覆蓋在欲塗佈的位置，建議的塗佈厚度是 1-2mm，但厚度不會影響本產品的性能。
6. 使用本產品後不能再灌洗手術的區域。

禁忌

已知對本產品過敏的患者不可使用。

如同其他的手術材料，在手術部位有感染的病患不可使用本產品。

保存

本產品請置於冷藏中保存，不可冷凍(2°C-8°C)。

有效期間標示於外盒與包裝上，最長為 3 年。

警告與注意事項

1. **有嚴重過敏症或有過敏症病史的病人時，必須由醫師審慎斟酌使用。**
2. **本產品本身沒有抑菌或殺菌的效果。**
3. **本產品與其他抗組織粘黏的產品或是與腹腔注射液併用的效果尚未建立。**
4. **本產品使用在癌症患者的安全性尚未建立。**
5. **本產品不建議使用於孕婦，因為安全性資料尚未確立。並建議在使用本產品後，於第一個完整的月經週期期間避免懷孕。**
6. **本產品已填充於注射針筒內，限單次使用。為防止汙染與方便於手術房中使用，外層再加上保護用的包裝袋。**
7. **本產品於拆封後建議立即使用。**
8. **所有的產品組裝程序皆必須於無菌的狀態下操作。**
9. **注射針筒僅能單次使用，未使用部分不能重複使用。**
10. **使用後的容器要妥善地處理丟棄。**
11. **請將本產品放置於兒童不易取得之處。**
12. **若包裝有破損，請勿使用，並與本公司聯絡。**
13. **本產品過期後請勿使用。**

規格

本品分為二種濃度 30mg/ml 與 40mg/ml

包裝規格：5ml/支及 10ml/支

醫療器材商名稱：瀚醫生技股份有限公司

醫療器材商地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 15

樓之 11

製造業者名稱：瀚醫生技股份有限公司

製造業者地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 15

樓、15 樓之 12