

“瀚醫生技”不沾黏紗布 (滅菌含膠原蛋白) “HANBIO” Gauze (Sterilized, 1% Collagen)

衛部醫器製字第 007165 號

注意：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

產品資訊

本產品可依不同傷口需求裁剪成適當形狀使用；用於傷口照護，具有良好的生物相容性。

成分

PET 聚酯纖維、1% 牛皮革取膠原蛋白(collagen)

適應症

適用於皮膚淺層的傷口照護

特性與功能

1. 具彈性與傷口服貼
2. PET 表面不沾黏表面組織傷口

使用說明

1. 使用前清潔傷口，取出本產品輕輕覆蓋在傷口上。
2. 必要時可以適合之二次敷材包紮傷口，以固定本產品。
3. 本產品於傷口照護中，在無感染的狀況下，將傷口清潔後保持乾燥，將紗布取下，將紗布剪成適當大小後輕輕覆蓋於傷口，以二次敷材包紮之。

滅菌與保存方式

本產品經 Gamma 輻射滅菌，若包裝有破損，不可使用。
本產品應保存於室溫且避免陽光直射之環境。

警告與注意事項

1. 本產品不可重複使用，拆封後應立即使用。
2. 產品包裝不完整，請勿使用。
3. 不可用於對膠原蛋白有過敏症狀病史之患者。患者可能因膠原蛋白產生過敏症狀，包括紅斑、腫脹或蕁麻疹。
4. 本產品務必儲存於室溫下乾燥環境，請勿將產品置於極端環境條件下。
5. 本產品有限期間為 3 年，過期後請勿使用。

規格

本產品為滅菌袋單片包裝，每盒 10 片裝，各式尺寸規格如下：

- 規格 (10x10cm)
- 規格 (7.5x7.5cm)
- 規格 (5x5cm)
- 規格 (2.5x2.5cm)
- 規格 (1x2.5cm)

醫療器材商名稱：瀚醫生技股份有限公司

醫療器材商地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 15 樓
之 11

製造業者名稱：瀚醫生技股份有限公司

製造業者地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 15 樓及
15 樓之 12