

HANBIO Patient lubricant

產品概述

瀚醫生技術用潤滑劑 (未滅菌) 為透明、無色且黏稠的凝膠，主要成份為一種大分子玻尿酸衍生物以及卡拉膠(Carrageenan)。玻尿酸本身是人體皮膚成分之一，具生物相容性及生物功能性，能保持陰道的濕潤。卡拉膠是紅藻類海藻草萃取的親水性膠體，能提高凝膠的彈性和保水性。

女性陰道內通常有少量分泌物，以維持陰道內的濕潤及潤滑，但在某些情況下可能會有分泌物不足的狀況，因此必須靠潤滑劑的協助；瀚醫生技術用潤滑劑是針對陰道乾燥病患設計之潤滑劑，包括配方與陰道投與方式。

產品組成

本產品含有玻尿酸、卡拉膠、氯苯甘醚、苯氧乙醇、1,3 丁二醇及超純水。

產品規格

本產品為容量 3mL，單一劑量包裝之病患用潤滑劑，預充填於密閉之拋棄式陰道投藥器內，輸送凝膠的推桿在使用前組裝。

產品適用的病患族群與病況

本產品為病患用潤滑劑，基於病患醫療或診斷需要，用於陰道部位之潤滑劑。

適用於因賀爾蒙或分泌物不足更年期、生產後、哺乳期、手術後、口服避孕藥、壓力較大、過敏性疾(Sjögren's Syndrome)、或是進行化學療法或放射線治療後的婦女，會有陰道乾燥，進而產生灼熱、搔癢或感染等情形，能協助病患陰道的潤滑，使得病患進行內診或檢查時可以降低不適感，亦可以在醫師建議與指導下於居家自行使用，改善陰道乾燥之不適症狀。

禁忌症

對玻尿酸或是卡拉膠過敏的患者不可使用。

產品儲存

本產品需儲存於室溫與陰涼、乾燥處。

注意事項

- 1.若有陰道感染狀況，使用此產品前請先諮詢專業醫師。
- 2.若包裝有破損之情況，請勿使用。
- 3.使用完畢的投藥器請妥善處理丟棄，不可重複使用。
- 4.本產品存放於室溫下，以陰涼、乾燥處為佳。
- 5.本產品若過期，請勿使用。

有效期限

製造日期與有效期限標示在外包裝上，請勿使用超過有效期限之本產品。


使用方法

步驟一




雙手洗淨後，將預充填凝膠之投藥器收縮膜打開後，再將推桿與投藥器膠塞鎖緊。

步驟二

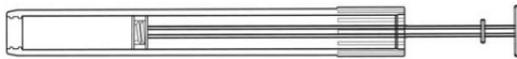


將投藥器前端鎖蓋打開即可使用。

步驟三

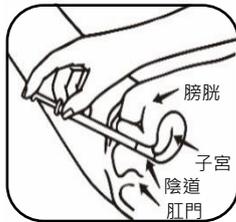

身體或坐或躺，雙腳採彎曲姿勢，將投藥器輕送入陰道約 5-8 公分處，若陰道太乾燥時可以先擠出少許凝膠塗抹於投藥器上，以減低不適感。

步驟四

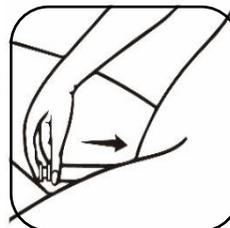

將推桿推到底，使凝膠推出於陰道內，即可將投藥器取出。
將推桿鬆開(可以重複使用)，再將投藥器丟棄即可。

製造業者名稱:瀚醫生技股份有限公司

製造業者地址:新北市汐止區新台五路一段 99 號 15 樓、15 樓之 1、15 樓之 12

醫療器材商名稱:瀚醫生技股份有限公司

醫療器材商地址:新北市汐止區新台五路一段 99 號 15 樓之 11