

注意：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

產品資訊

本產品是一種膠原蛋白的傷口覆蓋物。產品外觀呈現白色，具有多孔性及可吸收性。本產品可依不同傷口需求裁剪成適當形狀使用。本產品用於傷口照護，具有良好的生物相容性。

成分

牛皮革取膠原蛋白 (collagen)

適應症

適用於皮膚淺層或深層的傷口照護

特性與功能

1. 具有吸液性
2. 具柔軟及彈性與傷口服貼
3. 形成凝膠保護膜
4. 不沾黏表面組織傷口 (可以用生理食鹽水完整清理)

使用說明

1. 使用前清潔傷口，取出敷料輕輕覆蓋在傷口上。
2. 必要時可以合適之二次敷材包紮傷口，以固定膠原蛋白敷料。
3. 本產品可被人體直接吸收不必移除，如有換藥的需求，在無感染的狀況下，將傷口清潔後保持乾燥，將敷料留置於傷處，不需進行移除的動作後進行二次敷材包紮即可。

滅菌與保存方式

本產品經 Gamma 輻射滅菌，若包裝有破損，不可重複滅菌。

本產品應儲放於 25°C 以下，且避免陽光直射之環境。

警告與注意事項

1. 產品包裝不完整，請勿使用。
2. 不可用於對膠原蛋白有過敏症狀病史之患者。患者可能因膠原蛋白產生過敏症狀，包括紅斑、腫脹或蕁麻疹。
3. 本產品務必儲存於 25°C 以下乾燥環境，請勿將產品置於極端環境條件下。
4. 本產品為單一病人使用，拆封後建議立即使用。
5. 本產品有效期間為三年，過期後請勿使用。

規格

本產品之各式規格如下：

● 片狀

規格 (L x W x H)：

10 mm x 5 mm x 3 mm	50 mm x 50 mm x 3 mm
12 mm x 6 mm x 3 mm	50 mm x 100 mm x 3 mm
12 mm x 8 mm x 3 mm	50 mm x 120 mm x 3 mm
15 mm x 6 mm x 3 mm	80 mm x 120 mm x 3 mm
15 mm x 10 mm x 3 mm	100 mm x 100 mm x 3 mm
25 mm x 25 mm x 3 mm	120 mm x 120 mm x 3 mm
25 mm x 50 mm x 3 mm	

● 圓柱狀

規格 (Ø x H)：

- 10 mm x 20 mm
- 10 mm x 3 mm

醫療器材商名稱：瀚醫生技股份有限公司

醫療器材商地址：新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 15 樓之 11

製造業者名稱：瀚醫生技股份有限公司

製造業者地址：新北市汐止區新台五路 1 段 99 號 15 樓、15 樓之 1、15 樓之 12