

療復膀胱灌注液(滅菌)

LEOFOR Hyaluronic Acid Solution (sterile)

衛部醫器製字第 007360 號

注意：使用前請務必詳閱使用說明書並遵照指示使用

產品資訊

本產品是一種糖胺聚醣(glycosaminoglycan, GAG)結構之聚合物，可以用以暫時性補充膀胱上皮細胞糖胺聚醣層(glycosaminoglycan layer, GAG layer)，使得受損之膀胱上皮細胞降低受尿液中的有害物質刺激。
本產品為滅菌、不具熱原，且限單次使用的產品。

適應症

- 間質性膀胱炎

使用說明

1. 本產品應經專業醫師判斷並評估患者是否適用。
2. 利用無菌導尿管將患者膀胱中的尿液排空後，再將本產品注入膀胱。為達最佳療效，本產品經膀胱注入後，應盡量延長產品在膀胱滯留時間，至少維持 30 分鐘。
3. 建議使用以六個月為周期，第一個月每周灌注一次，第二至六個月每月灌注一次，至療程結束或症狀解除。

禁忌

1. 不適用於對玻尿酸過敏之病患。
2. 格蘭氏陽性細菌蛋白質過敏之病患。

保存

1. 本產品應保存於室溫之環境，不可冷凍或暴露於高溫下。
2. 本產品有效期間為 3 年。

警告與注意事項

1. 本產品僅供膀胱灌注使用。
2. 本產品需搭配無菌導尿管使用。
3. 如果出現不良反應，請停止使用。
4. 玻尿酸已知與四級銨鹽不相容。
5. 本產品務必儲存於室溫下，請勿將產品置於極端環境條件下。
6. 本產品屬單次性產品，於拆封後請立即使用。
7. 本產品為無菌產品，若內包裝(如：玻璃瓶、鋁蓋或膠塞)有破損，請勿使用。
8. 本產品過期後請勿使用。

規格

- 每瓶 50ml 溶液含有 40mg 之玻尿酸。

醫療器材商名稱：瀚醫生科技股份有限公司

醫療器材商地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 15 樓之 11

製造業者名稱：瀚醫生科技股份有限公司

製造業者地址：新北市汐止區新台五路一段 99 號 15 樓、15 樓之 12